

DOKUMENTERT LUKKET BLANDESYSTEM

ECOFLAC® CONNECT

Ecoflac® Connect systemet er et dokumentert lukket blandesystem som brukes ved utblandinger av antibiotika og andre legemidler. Sammen med et infusjonssett, fungerer Ecoflac® Connect som et lukket blandesystem. Beholder, adapter, infusjonssett og hetteglass med legemiddel kobles sammen. Først fylles infusjonssettet med nøytral løsning fra beholderen. Deretter blandes medikament ved hjelp av adapteren. Systemet er helt lukket under utblanding og under infusjon, og risikoen for forurensing av miljøet med medikament, gass og aerosol er eliminert.

Ecoflac® Connect er en effektiv barriere mot forurensing av utblandet legemiddel. (Ecoflac® Connect dokumentert lukket system Aerosol, forurensing.) Dette betyr at sykepleier kan blande legemidler ved pasientsengen når det er behov for det.

Ved bruk av Ecoflac® Connect blir medikament-hetteglasset sittende fast i adapteren under infusjonen. Dette gir en ekstra sikkerhet for pasient og helsepersonell, som enkelt kan identifisere at pasienten får det foreskrevne medikamentet.

Ecoflac® Connect finnes i tre størrelser tilpasset de hetteglass vi finner i Norge – medium, large og small. Ecoflac® Connect str. medium er tilpasset hetteglass av standard størrelse.

Kravet til et lukket system er ifølge NIOSH standard (The National Institute for Occupational Safety and Health), en enhet som ikke utveksler ufiltrert luft og ikke forurenser det tilstøtende miljø.

Etter sammenkobling av medikamentglass, beholder og overføringsadapter Ecoflac® Connect, er systemet dokumentert tett i 14 dager. Selve utblandingen kan da skje ved behov.

Ecoflac® Connect kan brukes sammen med alle typer infusjonssett – også pumpesett. Om ønskelig kan man bruke systemet sammen med et skyllesett – SafeSet® flush, og man har da mulighet til å etterskylle medikamentbeholder og fullstendig unngå residualvolum.



Ecoflac® Plus:

VNR	Beskrivelse	Størrelse
42 00 79	Natriumklorid 9mg/ml	20 x 50 ml
54 70 94	Natriumklorid 9mg/ml	20 x 100 ml
58 39 16	Natriumklorid 9 mg/ml	10 x 250 ml
38 14 79	Glucos 50 mg/ml	20 x 100 ml
16 44 12	Glucos 50 mg/ml	10 x 250 ml
45 26 31	Sterilt vann	20 x 50 ml
45 25 40	Sterilt vann	20 x 100 ml



Ecoflac® Connect:

Ecoflac® Connect	Tilpasset medikamentglass	Artikkelnr.	VNR
Liten	Diameter 13 mm	4090549	96 90 07
Medium	Diameter 20 mm	4090550	90 33 34
Stor	Diameter 32 mm	4090552	80 36 18



Intrafix® SafeSet:

Artikkelnr.	Beskrivelse
4063000	Basic, 180 cm
4110000	Intrafix SafeSet Flush IV-sett for etterskyl

